

FICHA TÉCNICA



LIMOSEPTIC PLUS

**DESINFECTANTE POR CONTACTO
DIRECTO DE SUPERFÍCIES CRÍTICAS CON
ACCIÓN DETERGENTE**

Bactericida-fungicida concentrado con
acción detergente.

Eficaz frente a virus con envuelta.

Sin aldehídos y con olor agradable.



Composición:

- 4,5% Cloruro de didecildimetilamonio
- Excipientes c.s.p. 100

Modo de empleo:

Diluir el producto y aplicarlo mediante las técnicas de aplicación de doble cubo, mopa, bayeta aséptica o pulverizado a baja presión. Dejarlo actuar en base a la actividad microbicida requerida. No requiere de posterior aclarado.

Aplicaciones:

- Superficies críticas en hospitales, clínicas y consultas médicas.
- Laboratorios clínicos y farmacéuticos
- Ambulancias

Eficacia:

	Estudios	Tiempo	Dilución
Bactericida	EN1276; EN13697	5 min	1%
Levuricida	EN1650; EN13697	15 min	1%
Fungicida	EN1650; EN13697	15 min	1%
Viricida	RKI/DVV (<i>Vaccinia virus</i> y BVDV)	30 min	2%



JOSE COLLADO, S.A.
Especializados en profilaxis
Costa Rica 35, Local Comercial n°1
Tel. 93 349 61 12 Fax. 93 351 46 40
08027 BARCELONA

FICHA TÉCNICA

Características físico-químicas:

- Aspecto: líquido
- Color: rosa intenso
- Olor: lavanda
- Densidad: $1,02 \pm 0,02$ (a 20°C)
- pH: 12 ± 1 (a 20°C)
- pH (1%): alrededor de 10,5 (a 20°C)

Registro:

AEMPS 488-DES

Precauciones:

- No mezclar con hipocloritos ni derivados aminados ni detergentes aniónicos.
- Incompatible con álcalis fuertes, productos oxidantes.
- No mezclar con ácidos.

Presentaciones:

Sobre monodosis 25 ml

Envase autosifificador 1 L

Envase 5 L (válvula dosificadora opcional; 1 pulsación=25 ml)

Envase 5 L estéril (válvula dosificadora opcional; 1 pulsación=25 ml)