

# FICHA TÉCNICA



## LIMOSEPTIC SF

### DESINFECTANTE CON ACCIÓN DETERGENTE DE SUPERFÍCIES CRÍTICAS POR CONTACTO DIRECTO

Bactericida, fungicida, viricida  
concentrado, con acción detergente.



### Composición:

- 5% Glutaraldehído
- 4,5% Cloruro de didecildimetilamonio
- Coadyuvantes y excipientes, c.s.p. 100%

### Dosis:

Bactericida (EN 13697)	1,0% (verter 50 ml en 5 litros)
Fungicida (EN 13697)	1,0% (verter 50 ml en 5 litros)
Viricida (EN 14476)	1,0% (verter 50 ml en 5 litros)

### Aplicación:

Limpieza y desinfección de superficies de zonas críticas mediante doble cubo, bayeta aséptica, mopa pre-impregnada o pulverización a baja presión.

Para eficacia bactericida, dejar actuar durante **5 minutos**.  
Para eficacia fungicida, dejar actuar durante **15 minutos**.  
Para eficacia viricida, dejar actuar **15 minutos**.



### Usos:

- Superficies de zonas críticas de ámbito clínico y laboratorios farmacéuticos.

### Eficacia: BACTERICIDA-FUNGICIDA-VIRUCIDA

**UNE-EN 13697:** Bactericida/fungicida (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*)

**UNE-EN 14476:** Virucida (Poliovirus Type 1, Adenovirus)

**UNE-EN 1276:** Bactericida (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*).

**UNE-EN 1650:** Fungicida (*Aspergillus niger*, *Candida albicans*)

**Actividad según EN 1276 (0,25%):** Bactericida frente *Listeria monocytogenes*, *Shigella sonnei*, *Salmonella typhimurium*.

**Actividad según EN 1276 (0,25%):** Bactericida frente cepas resistentes de *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Acinetobacter baumannii*



**JOSE COLLADO, S.A.**  
Especializados en profilaxis  
Costa Rica 35, Local Comercial nº1  
Tel. 93 349 61 12 Fax. 93 351 46 40  
08027 BARCELONA

# FICHA TÉCNICA

## Características químico-físicas:

- Forma: líquido
- Color: verde
- Olor: característico
- Densidad:  $1,009 \pm 0,001$  (a 20°C)
- pH:  $4,75 \pm 0,75$  (a 20°C)

## Registro:

AEMPS 614-DES

## Precauciones:

- *No mezclar con hipocloritos ni derivados aminados ni detergentes aniónicos*
- *Incompatible con álcalis fuertes, productos oxidantes.*

## Presentaciones:

Envase de 5 L (válvula dosificadora opcional; 1 pulsación = 25 ml) (disponible en formato estéril, esterilizado por microfiltración y óxido de etileno, ideal para zonas críticas y salas "clean-room")

Caja de 40 sobres monodosis de 25 ml (disponible en formato estéril, esterilizado mediante rayos gamma, en doble bolsa que contiene 20 sobres, ideal para zonas críticas y salas "clean-room")